



クロノポンプを用いて
キュービトルを注射される患者さんへ

クロノJET100の ご使用方法のご紹介

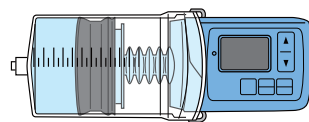



クロノポンプ用

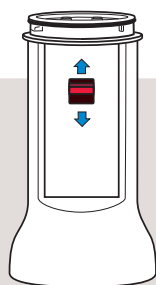

クロノJET100とは


クロノJET100 (以下、クロノJET) は、クロノポンプでキュービトルの注射の準備をする際に使用できる、クロノポンプシリンジ専用の機器です。ねじ式吸引プランジャーの代わりにクロノJETを使用することで、薬剤のバイアルから注射用のシリンジへ自動でお薬を抜き取ることができます。

ねじ式
吸引プランジャー

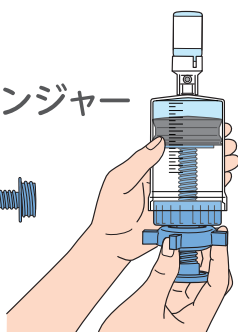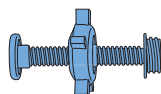

又は


クロノJET

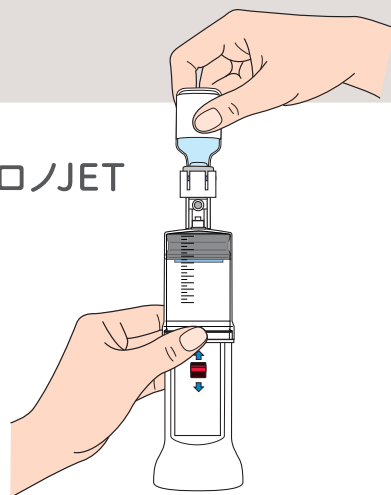

バイアルからお薬の抜き取りは、
ねじ式吸引プランジャーかクロノJETのどちらかを使用します。



- クロノJETは、バイアルからシリンジにお薬を抜き取る際に使用します。
- 皮膚に針を刺した状態で、絶対にクロノJETをシリンジに接続しないでください。

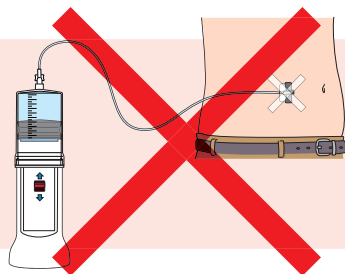

- 使用前に、クロノJETの表面が清潔であることを確認してください。
- シリンジとの接続部に液体がつくのを防ぐため、クロノJETを洗剤や水にひたさないでください。
- クロノJETを洗剤で洗わないでください(特に研磨剤や除光液を含む場合)。
- 使用後は清潔にし、室温で乾燥した場所に保管してください。
- 吸引が不十分な場合は、電池を交換してください。




・ 必要に応じてクロノポンプに同梱されているクロノJETの取扱説明書もご参照ください。
・ 輸注ポンプの設定や注射の方法について、詳しい手順は「キュービトル自己注射マニュアル クロノポンプ用」をご参照ください。

- 必要に応じてクロノポンプに同梱されているクロノJETの取扱説明書もご参照ください。
- 輸注ポンプの設定や注射の方法について、詳しい手順は「キュービトル自己注射マニュアル クロノポンプ用」をご参照ください。



クロノJETを使用してお薬をシリンジに抜き取る手順

- ① シリンジのプランジャーを前後にスライドさせてスムーズに動くようになるまで全体をなじませます。
- ② プランジャーを押して、シリンジ内のゴム部分を奥まで押し込みます。プランジャーと青いキャップをシリンジから取りはずします。
- ③ シリンジを矢印の方向に回して、クロノJETに取り付けます。

- ④ 採液針(ツートック)を矢印の方向に回して、シリンジに取り付けます。
- ⑤ バイアルを逆さにして、シリンジに取り付けた採液針(ツートック)へ垂直に刺しこみます。
- ⑥ クロノJETの赤いスイッチを下に押しつけてお薬を抜き取ります。
※このときクロノJETは垂直にして、傾けないでください。

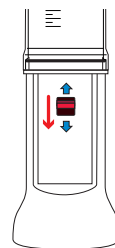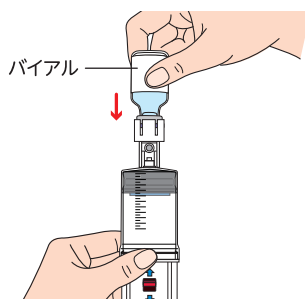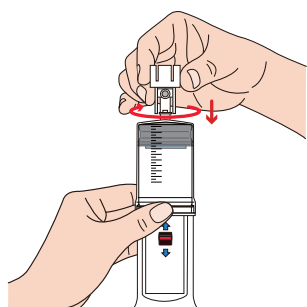

- ⑦ 必要量のお薬を抜き取ったら、バイアル、採液針、シリンジの順に取りはずします。
- ⑧ 再度、青いキャップとプランジャーを取り付けて固定します。

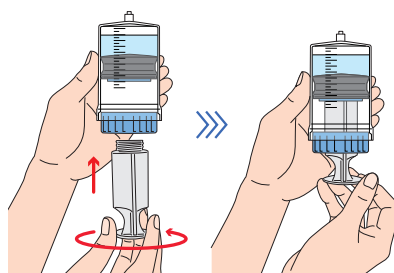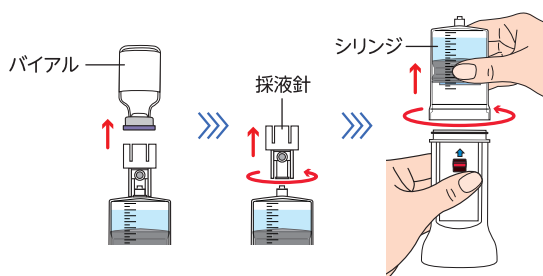

このあとプライミング*に進みます。【キュービトル自己注射マニュアル(クロノポンプ用) p.14以降を参照ください】

*シリンジに翼状針を取り付けた後、チューブから針先手前までお薬を満たして空気を抜くこと。



武田薬品工業株式会社